透析患者に関する薬剤情報 医療法人仁真会 白鷺病院 薬剤科

▼ディスオーパ消毒液 0.55% [外]

【重要度】 【一般製剤名】フタラール phtharal 【分類】化学的殺菌・消毒剤 [医療用器具・機器・装置専用]

【単位】▼3.8L/本 [0.55%]

【用法】原液のまま使用. 5分以上浸漬

【特徴】アルデヒド基が菌体の細胞外膜や細胞外壁の一級アミン, ·SH 基並びに蛋白と結合し、殺菌効果を示すと考えられている. 細菌、芽胞、真菌、ウイルスに対して有効. グルタラール製剤と異なり、経時的に分解せず、希釈による効果低下に注意.

【主な副作用・毒性】残存した場合、ショック・アナフィラキシー様症状

[MW] 134.13

【備考】人体には使用しない. 濃度が0.3%未満になっていないことを確認、14 日間を超えて使用しない. 内視鏡自動洗浄機では約30 回の使用を目安に交換. 経尿道的検査, 処置のために使用する医療器具類には使用できない (サイデックスを使用).

【更新日】20180409

※正確は情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適別性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、 直接または間間接がに生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。 ※本サイトに掲載の記事・写真などの無期産載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法が以て国際条約により保護されています。